

Videoconferenza Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantiere

Mascherine, quando e quali vanno bene in cantiere

30 aprile 2020

Arch. Marco Porini

**Un cantiere protetto
si costruisce insieme**



COVID-19



SEFORS

LAVORO IN CANTIERE: PRINCIPIO LEGISLATIVO

1


MISURE ORGANIZZATIVE

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

3


SOSPENSIONE LAVORAZIONI

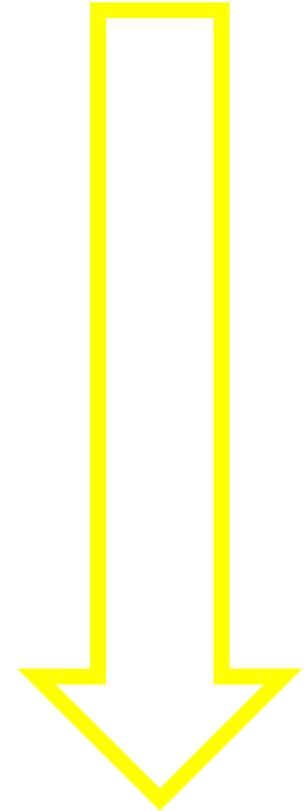

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Protocollo condiviso indica che nel caso in cui non siano possibili soluzioni organizzative che consentano di operare a distanza interpersonale superiore ad 1 metro è necessario il ricorso alla dotazione di mascherine e altri dispositivi di protezione.

In presenza di rischi specifici ulteriori, i DPI da utilizzare sono quelli previsti dalle rispettive normative a prescindere dalla distanza di sicurezza

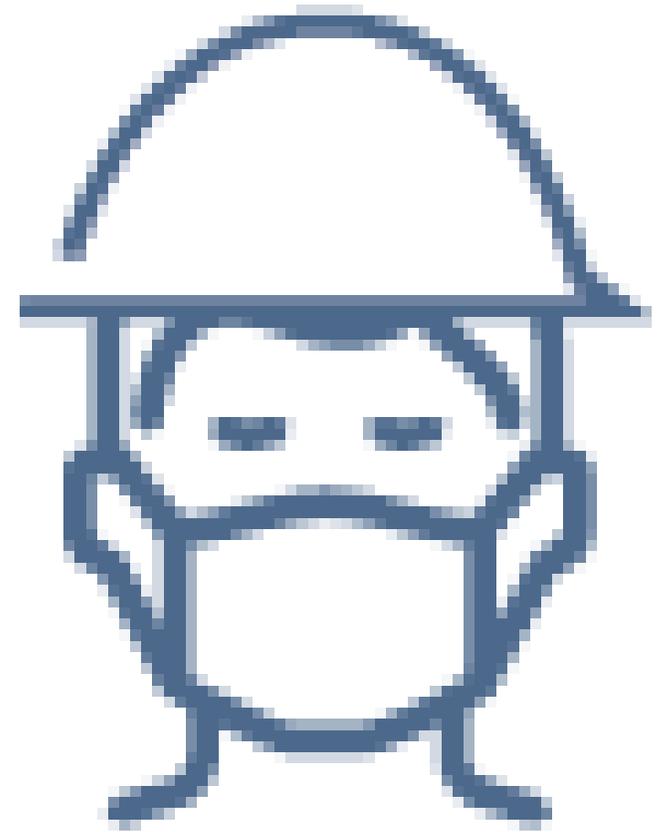

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie avviene con materiali o sistemi **filtranti** - Facciali Filtranti (FF) – Certificata CE secondo Norma tecnica UNI EN 149/2009. Secondo tale norma risultano efficaci contro i virus i facciali filtranti con protezione FFP2 e FFP3 – **PROTEGGONO CHI LA INDOSSA E RIDUCONO LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO VERSO TERZI**

Le **mascherine chirurgiche** Certificate CE secondo la norma UNI EN 14683/2019, sono testate per evitare l'eventuale trasmissione di contagio dal soggetto che la indossa verso l'esterno – **RIDUCONO LA TRASMISSIONE DEL CONTAGGIO DI CHI LA INDOSSA VERSO L'ESTERNO MA NON PROTEGGONO CHI LA INDOSSA**



MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento sul mercato e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria.

L'articolo 16 comma 1 del DL 18 del 17/03/2020, per il SOLO contenimento del rischio COVID, vengono considerati Dispositivi di protezione individuale anche le mascherine chirurgiche; nei cantieri edili potranno essere usate «su indicazione del CSE, ove previsto e nominato» come integrato dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020.



TIPOLOGIA DI MASCHERINE UTILIZZABILI SUL LUOGO DI LAVORO

Le tipologie di mascherine

DISPOSITIVI MEDICI

Mascherina chirurgica



servono per proteggere gli altri
monouso

Le **mascherine chirurgiche** sono
presidio medico chirurgico.



SEFORS

Devono avere certificazione CE secondo la norma UNI EN 14683/2019 oppure prodotte o importate in deroga secondo quanto previsto dal DL 18 del 17/03/2020 art.15 comma 2 e **AUTORIZZATE da Istituto Superiore di Sanità** sul cui sito riporta l'elenco delle Autorizzazioni rilasciate

https://www.iss.it/documents/20126/0/20200428_Autorizzazioni_Rilasciate.pdf/11b805ec-8166-d67f-1dbf-87e55cb57dd4?t=1588086420747

TIPOLOGIA DI MASCHERINE UTILIZZABILI SUL LUOGO DI LAVORO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

FFP1, FFP2 (o N95*), FFP3 (o N99 e N100*)



* N95, N99 e N100 sono la classificazione americana

Le **mascherine filtranti FFP2 e FFP3** sono DPI. Vista la difficoltà a reperirle sul mercato per il solo periodo di emergenza possono essere, in alternativa alla certificazione CE UNI EN 149/2019, prodotte o importate secondo quanto previsto dal DL 18 del

17/03/2020 art.15 comma 3 e **AUTORIZZATE da INAIL** sul cui sito riporta l'elenco delle Autorizzazioni rilasciate

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf



SEFORS

TIPOLOGIA DI MASCHERINE UTILIZZABILI SUL LUOGO DI LAVORO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

FFP1, FFP2 (o N95*), FFP3 (o N99 e N100*)



con valvola
protegge chi la indossa



senza valvola
protegge chi la indossa e gli altri

* N95, N99 e N100 sono la classificazione americana

Anche le mascherine filtranti N95, N99 e N100, classificazione Americana o le KN95, KN99, KN 100 classificazione Cinese simili alle CE ffp1, ffp2 e ffp3, **prodotte o importate**

secondo quanto previsto dal DL 18 del 17/03/2020 art.15 comma 3 devono essere AUTORIZZATE da INAIL per essere considerate DPI. Elenco Autorizzazioni rilasciate a questo link

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf



SEFORs

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MASCHERA CHIRURGICA

Protezione verso l'esterno:

Trattiene le sole particelle emesse da chi la indossa. Non ha la funzione di proteggere il portatore da agenti patogeni esterni;

Viene utilizzata per evitare che chi la indossa propaghi il virus attraverso starnuti e colpi di tosse;

E' più comoda dato che veste in maniera più larga sul volto;

Può essere indossata dai cittadini;

Si trova di frequente presso le farmacie.

FFP2/FFP3 (o N95/N99)

Protezione verso chi le indossa:


Filtrano l'aria inspirata proteggendo chi le indossa ed alcune tipologie filtrano anche l'aria espirata (protezione verso l'esterno);

Livelli raccomandati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Le FFP2 filtrano oltre il 92% delle particelle in sospensione, le FFP3 arrivano a valori pari o superiori al 98%;

Devono aderire al volto ed essere indossate correttamente (vedere istruzioni);

Vanno indossate prevalentemente dal personale sanitario come da indicazione OMS

Si trovano presso rivenditori specializzati.

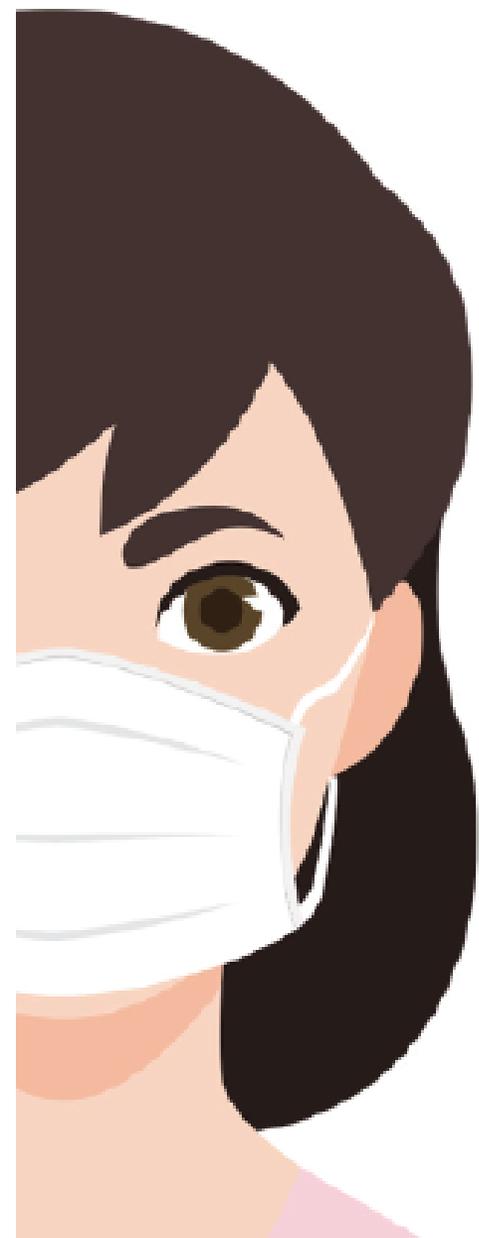

SEFORS

MASCHERINA CHIRURGICA



SEFORS

COME SI INDOSSA




Va presa per gli elastici senza toccare la mascherina e deve coprire naso e bocca aderendo al viso

QUANTO SI TIENE



Dalle 2

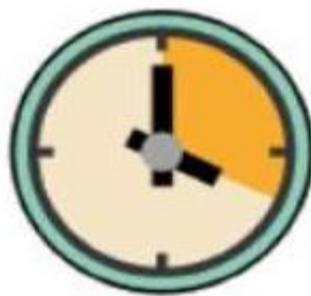

alle 4 ore

Va tolta se è umida o sporca

COME SI TOGLIE



Va presa dall'elastico, ripiegata su stessa senza toccare l'esterno e buttata nell'indifferenziato

■ La mascherina è monouso

■ Non bisogna comunque avvicinarsi a meno di un metro dalle altre persone



■ Non protegge gli occhi dalle cui mucose può passare il virus





PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

**1**

Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.

**2**

Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.

**3**

Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

**4**

Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.

**5**

La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

- Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione
- Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
- Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DLGS 81/08

Sono sospesi e annullati tutte le attività di formazione anche obbligatoria effettuata in aula; è comunque possibile effettuare formazione a distanza anche per i lavoratori in smart working.

I corsi di formazione alla sicurezza obbligatori devono essere svolti durante l'orario di lavoro, e come tali retribuiti, come previsto dall'art.37 comma 12 del DLGS 81/08

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro dovuto all'emergenza in corso, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento del proprio ruolo/funzione (ad esempio il carrelista potrà continuare ad utilizzare il muletto)





SEFORS
deve

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nelle aziende dove era già prevista, la sorveglianza sanitaria deve proseguire, privilegiando, in questo periodo:

- segnalazione di eventuali casi «fragili» al Datore di Lavoro da parte del Medico Competente
- le visite preventive
- le visite a richiesta
- le visite da rientro da malattia

Anche **le visite periodiche non vanno interrotte** essendo una ulteriore misura di prevenzione, un'occasione per intercettare possibili casi di contagio o lavoratori con sintomi sospetti e un'occasione per informare e formare i lavoratori su come evitare la diffusione del contagio

SORVEGLIANZA SANITARIA

Prima del rientro al lavoro di un lavoratore a seguito di infezione da COVID19 e dichiarato guarito a seguito di certificazione di avvenuta negativizzazione del doppio tampone, è obbligatoria la visita medica preventiva alla ripresa del lavoro, anche se non ha superato i 60 giorni consecutivi di assenza dal lavoro



Vi ringraziamo per aver partecipato alla videoconferenza e vi ricordiamo che sul nostro sito internet c'è una pagina in continuo aggiornamento sul tema Covid-19 al seguente link:

<http://www.seforsvco.it/news/indicazioni-da-applicare-sui-luoghi-di-lavoro/>

Per richieste di chiarimenti mandate una e-mail a

sicurezza@seforsvco.it



SEFORS